PIED CHIRURGIE DE L'ARRIÈRE-PIED CALCAnail FRACTURE ARTHRODÈSE SUBTALAIRE





Indications

CALCANAIL® est indiqué dans les pathologies suivantes de l'arrière pied :


- Arthrose;
- Déformation ;
- Fracture du Calcanéum.

Contre-indications


- Une infection, ou une infection latente : elles seront diagnostiquées sur des patients qui présentent un ou plusieurs des signes suivants : fièvre et/ou inflammation locale;
- Élévation inexpliquée du taux de sédimentation;
- Elévation du nombre de globules blancs ou changements constatés lors de différents contrôles du suivi du patient;
- Trouble mental ou neuromusculaire qui créerait un risque inacceptable d'instabilité, d'échec de fixation ou de complications dans les suites postopératoires;
- Os affaiblis par une maladie ou une infection ne pouvant procurer un soutien et une fixation adéquate;
- Obésité pouvant soumettre l'implant à des sollicitations qui peuvent compromettre la fixation du dispositif ou le dispositif lui-même;
- Allergie connue à l'un des composants du matériau cité sur l'étiquette du produit;
- Maladies métaboliques qui risqueraient de compromettre la consolidation osseuse;
- Toxico dépendance.



Nous proposons un abord talonnier avec forage du calcanéus à la tréphine. Associé à l'utilisation d'un distracteur talo-calcanéen, il permet un accès direct intra-focal aux fragments articulaires.

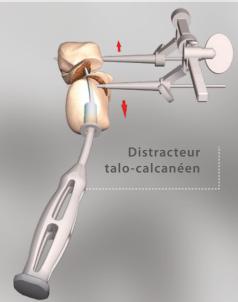

Cette technique donne la possibilité de corriger les déplacements de la tubérosité et d'obtenir une bonne réduction articulaire pour les fractures où les fragments articulaires sont volumineux, ou de faire une arthrodèse d'emblée dans les fractures articulaires plus complexes.

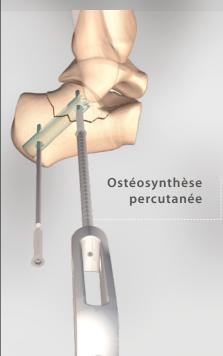

La réduction articulaire et calcanéenne est ensuite maintenue par une ostéosynthèse percutanée grâce au clou CALCANAIL®.





FRACTURE - ARTHRODÈSE SUBTALAIRE

Références

16	7	
	RÉF.	CLOU FRACTURE Ø10
	265 546	Clou Calcanail® Ø10 Lg 45 + bouchon
	265 547	Clou Calcanail® Ø10 Lg 50 + bouchon
	265 548	Clou Calcanail® Ø10 Lg 55 + bouchon

7				
RÉF.	CLOU ARTHRODÈSE Ø12			
265 549	Clou Calcanail® Ø12 Lg 65 + bouchon			
265 550	Clou Calcanail® Ø12 Lg 75 + bouchon			
265 551	Clou Calcanail® Ø12 Lg 85 + bouchon			

RÉF.	VIS
267 264	Vis canulée Ø5 Lg 24
267 265	Vis canulée Ø5 Lg 26
267 266	Vis canulée Ø5 Lg 28
265 552	Vis canulée Ø5 Lg 30
265 553	Vis canulée Ø5 Lg 32
265 554	Vis canulée Ø5 Lg 34
265 555	Vis canulée Ø5 Lg 36
265 556	Vis canulée Ø5 Lg 38
265 557	Vis canulée Ø5 Lg 40

Complément pour fracture Tongue Type

		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
j	RÉF.	VIS GRANDE LONGUEUR
£0		
9	265 558	Vis canulée Ø5 Lg 45
	265 559	Vis canulée Ø5 Lg 50
	265 560	Vis canulée Ø5 Lg 55
	265 561	Vis canulée Ø5 Lg 60
	265 562	Vis canulée Ø5 Lg 65
	265 563	Vis canulée Ø5 Lg 70
	265 564	Vis canulée Ø5 Lg 75
	265 565	Vis canulée Ø5 Lg 80

Date de modification document : avril 2022 - Fabricant : FH Industrie - Gamme : Pied - bePOD - Nom du produit : Calcanail - Destinataire : professionnel de santé - N° du marquage CE : 0459 - Classe du DM : IIb - Indications : arthrose, déformation, fracture du calcanéum ⚠ Recommandations d'utilisation : il est fortement conseillé de lire l'étiquette et la notice d'instructions du produit



FR, FH ORTHO SAS

3 rue de la Forêt 68990 HEIMSBRUNN - FRANCE Tél. +33 (0)3 89 81 90 92 Fax : +33 (0)3 89 81 80 11 info@fhortho.com www.fhortho.com

USA, FH ORTHO INC.

4908 N. Elston Chicago - IL 60630 - USA Tel.: +1 (773) 290 1039 / 844-77 FHINC Fax: +1 (708) 667 7618 info-us@fhorthopedics.com www.fhortho.com

UK, FH ORTHO LTD

Unit 1b, Century Park, Valley way Swansea Enterprise Park, Swansea, SA6 8RP - UK Tel.: +44 (0) 1792 464792 Fax: +44 (0) 844 412 7674 customer-servicesUK@fhorthopedics.com www.fhortho.com

PL, FH ORTHO POLSKA

Ul. Garbary 95/A6, 61-757 Poznan - POLSKA Tel: +48 61 863 81 27 Fax: +48 61 863 81 28 biuro@implants24.pl www.fhortho.com