



## FICHE PRODUIT

# CorTTape®

## FIXED

SYSTÈME DE FIXATION CORTICALE  
À BOUCLE NON-AJUSTABLE  
POUR LA RECONSTRUCTION DU LCA



Produit livré dans un double emballage  
et stérilisé à l'Oxyde d'Ethylène.  
**Ne pas restériliser.**

### Descriptif du produit

Le dispositif est composé de :

- Deux fils de traction non-résorbables en polyester (1 bleu/blanc et 1 blanc),
- Une boucle continue blanche tressée en polyéthylène de poids moléculaire très élevé (UHMWPE),
- Une plaque en titane (longueur : 12 mm, largeur : 4 mm, épaisseur : 1,5 mm, Ti-6Al-4V ELI).

### Caractéristiques du produit

Plusieurs longueurs de boucle sont disponibles :  
de 20 mm à 30 mm.

### Indications

CorTTape® FIXED est indiqué pour la fixation d'os ou de tissu mou dans des procédures orthopédiques nécessitant une reconstruction de ligament ou de tendon.



# CorTTape®

## FIXED


SYSTÈME DE FIXATION CORTICALE  
À BOUCLE NON-AJUSTABLE  
POUR LA RECONSTRUCTION DU LCA

### Choix de la longueur de boucle de CorTTape® FIXED

Calcul permettant de déterminer la longueur de la boucle :

Longueur totale du tunnel fémoral  $-$  Longueur de la logette osseuse (on recommande 30 mm)  $+$  10 mm\* (toujours arrondir à une taille supérieure).

\* les 10 mm supplémentaires sont nécessaires pour la bascule de la plaque.

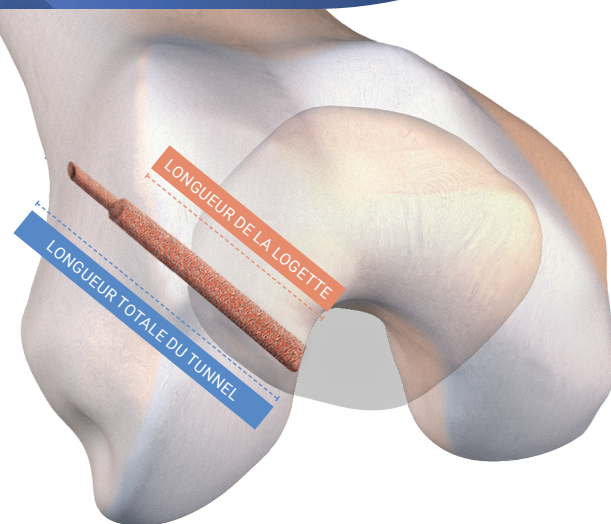

**Exemple :**

Longueur totale du tunnel 42 mm

$-$  Longueur de la logette fémorale 30 mm

$+$  10 mm de bascule

$=$  22 mm.

Choisir un Corttape® FIXED de 25 mm.

Longueur totale tunnel fémoral de diamètre 5 mm	40	45	50
<b>CHOIX DU BOUTON</b> Calcul de la longueur de boucle, bouton 20, 25, 30 + 10 mm de bascule	20	25	30

Réf. FH	Réf. fournisseur	Désignation
271 892	OBCL-20-Ti	CorTTape® FIXED 20 mm
271 893	OBCL-25-Ti	CorTTape® FIXED 25 mm
271 894	OBCL-30-Ti	CorTTape® FIXED 30 mm

**Date de modification document :** février 2026 - **Fabricant :** Riverpoint - **Gamme :** Sport Surgery - **Nom du produit :** CorTTape FIXED - **Destinataire :** professionnels de santé - **N° du marquage CE :** CE0459 - **Classe du DM :** IIb - Remboursable par les organismes d'assurance maladie dans certaines situations : consultez les modalités sur le site ameli.fr - **Indications :** les systèmes de fixation corticale servent à la fixation des tendons et des ligaments pendant les procédures de reconstruction orthopédique, par exemple, celle de reconstruction des ligaments croisés antérieurs (LCA). - **Recommandations d'utilisation :** il est fortement conseillé de lire l'étiquette et la notice d'instructions du produit.



DISTRIBUTEURS  
DISTRIBUTORS

GROUPE  
**FH ORTHO™**

**FR, FH ORTHO SAS**  
3 rue de la Forêt - Zone Industrielle  
BP 50009  
68990 Heimsbrunn CEDEX - FRANCE  
Tél. +33 (0)3 89 81 90 92  
Fax : +33 (0)3 89 81 80 11  
info@fhortho.com  
www.fhortho.com

**USA, FH ORTHOPEDICS INC.**  
OrthoEx  
7327 E Tierra Buena Lane  
Scottsdale, Arizona 85260 - USA  
Phone: +1 (412) 965-0950  
customerservice@fhortho-us.com  
www.fhortho.com

**PL, FH ORTHO POLSKA**  
Ul. Garbary 95/A6,  
61-757 Poznan - POLSKA  
Phone: +48 61 863 81 27  
Fax: +48 61 863 81 28  
biuro@implants24.pl  
www.fhortho.com