


ABLATION DU CLOU SIMPLIFIÉE


ÉTAPE 1 • Ablation des vis de verrouillage

- Reprise des incisions cutanées.
- Repérage à la scopie des têtes de vis et introduction des broches guide 1,6 mm (réf. 256 158) à la main.
- Introduction du tournevis (réf. 254 599) sur les broches et ablation des vis.

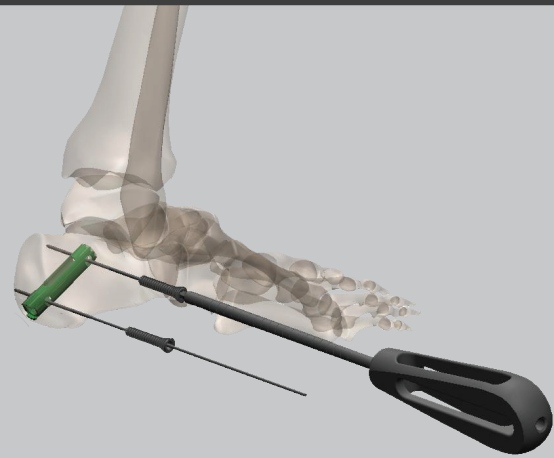

ÉTAPE 2 • Retrait du bouchon

- Pour retirer le bouchon, utiliser le tournevis (réf. 254 599) et s'aider éventuellement d'une broche pour le centrer.

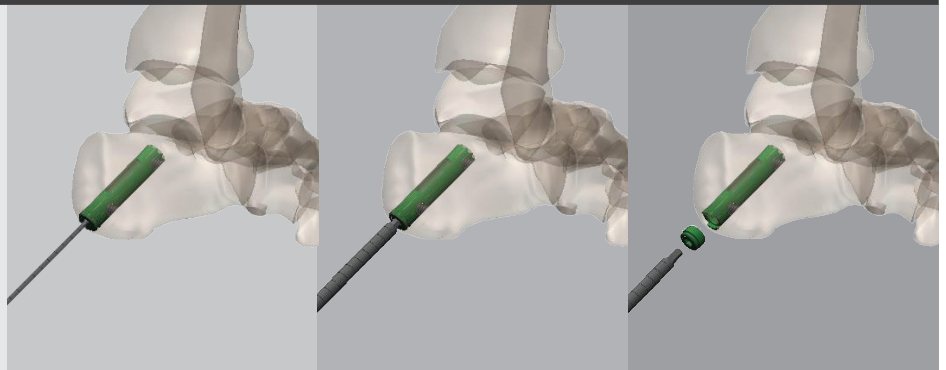


ÉTAPE 3 • Mise en place du porte-clou et de la vis de liaison

- Pour le clou fracture, utiliser la liaison poignée/clou (réf. 265 568).
- Pour le clou arthrodèse, utiliser la liaison poignée/clou (réf. 265 569).




- **Bien dégager l'extrémité proximale du clou et le filetage avec une curette fine.**
- **Effectuer des mouvements de rotation gauche/droite pour casser les ponts osseux et retirer le clou.**

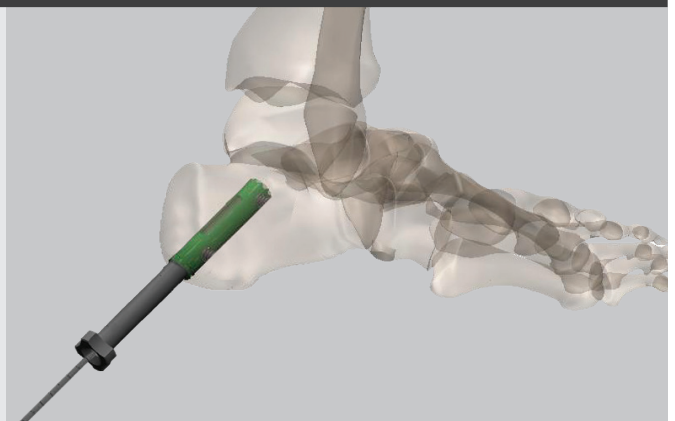

ÉTAPE 4 • Fraisage autour de l'implant


Si des mouvements alternatifs de rotation ne permettent pas de faire bouger le clou, il convient d'utiliser la tréphine de diamètre supérieur pour le dégager :

- Enlever la liaison poignée/clou et mettre en place la broche Ø1,6 LG 200 mm (réf. 266 158), puis passer la tréphine adéquate.
- Pour le clou fracture, utiliser la tréphine Ø12 mm (réf. 265 573).
- Pour le clou arthrodèse, utiliser la tréphine Ø14 mm (réf. 265 578).

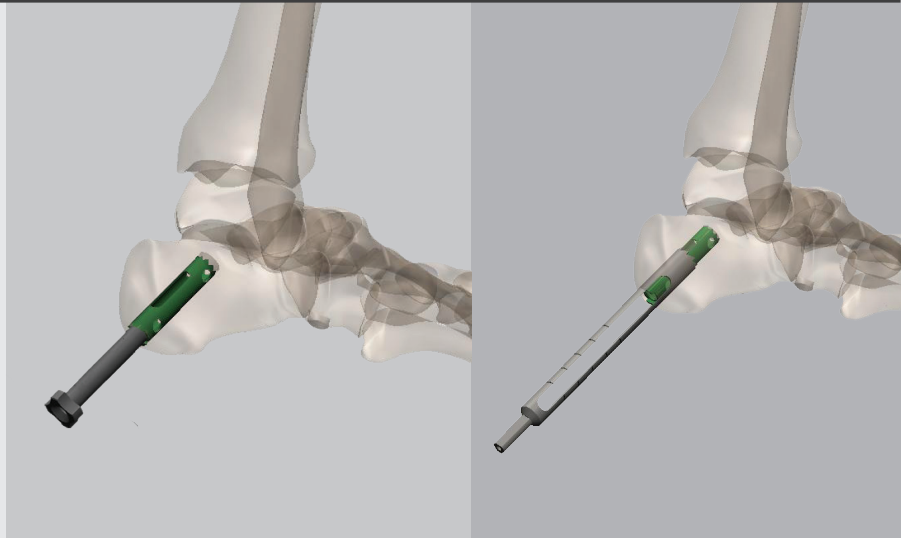


ÉTAPE 5 • Extraction du clou

- Remonter la liaison poignée/clou et tirer sur l'ensemble en réalisant des mouvements rotatifs alternés gauche/droite pour extraire le clou.

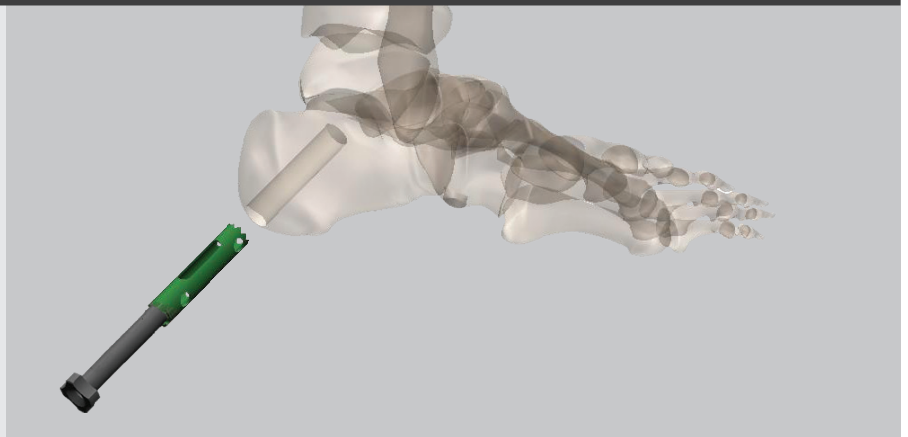

Ancillaire d'ablation Calcanail - A272 303

1. Liaison poignée-clou Calcanail Ø10.....réf. 265 568 ou 268 768
2. Liaison poignée-clou Calcanail Ø12.....réf. 265 569 ou 268 769
3. Tréphine Calcanail Ø12.....réf. 265 573 ou 267 056
4. Tréphine d'albation pour clou d'arthrodèse Ø14.....réf. 265 598 ou 268 770
5. Tournevis 3.5 canulé Ø18.....réf. 254 599
6. Broche Ø1,6 LG 200 mm (embout trocard et mouss).....réf. 266 158

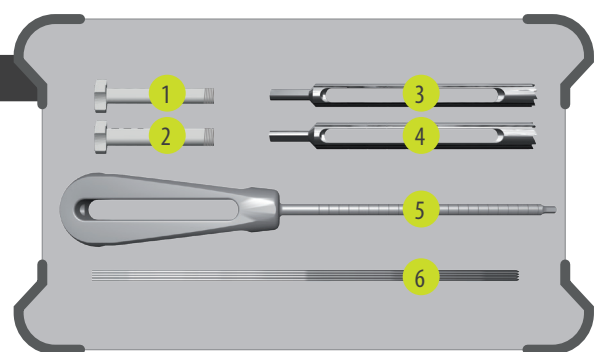

201411 - © FH0 com - ft_calcanail_extraction_simplifie_fr_MIG00349_2



DISTRIBUTEURS
DISTRIBUTORS

GROUPE
FH ORTHO™

FR, FH ORTHO SAS
3 rue de la Forêt - Zone Industrielle
BP 50009
68990 Heimsbrunn CEDEX - FRANCE
Tél. +33 (0)3 89 81 90 92
Fax : +33 (0)3 89 81 80 11
info@fhortho.com
www.fhortho.com

USA, FH ORTHOPEDICS INC.
OrthoEx
7327 E Tierra Buena Lane
Scottsdale, Arizona 85260 - USA
Phone: +1 (412) 965-0950
customerservice@fhortho-us.com
www.fhortho.com

PL, FH ORTHO POLSKA
Ul. Garbary 95/A6,
61-757 Poznan - POLSKA
Phone: +48 61 863 81 27
Fax: +48 61 863 81 28
biuro@implants24.pl
www.fhortho.com



FABRICANT
MANUFACTURER

FR, FH INDUSTRIE
6 rue Nobel, Z.I. de Kernevez
29000 QUIMPER - FRANCE
Tél. +33 (0)2 98 55 68 95
Fax : +33 (0)2 98 53 42 13
contact-fhi@fhortho.com
www.fhortho.com