


# Protocole de réalisation de guides de coupe sur mesure

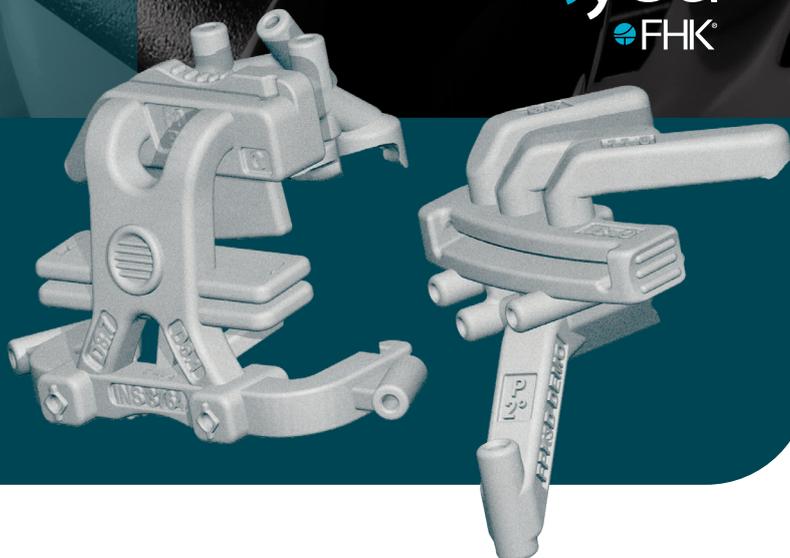

Les guides de coupe **Only you**® pour la prothèse totale de genou **FHK**® font partie d'une approche personnalisée et d'une planification 3D de la chirurgie de chaque patient, basée sur scanner ou IRM.



## DÉTAIL DE LA PROCÉDURE

**Prescription d'un scanner ou d'une IRM du genou.**

Réalisation de la procédure radiologique selon protocole spécifique.

- Délai 4 semaines -

- Envoi des images au GROUPE FH ORTHO,
- Traitement des données et mise en ligne des images de chaque patient sur le site de planification **Only you**® : <https://fhortho.digitalsolutions.app>
- Planification réalisée par le chirurgien,
- Livraison des guides de coupe à l'établissement, propres et prêts à être stérilisés (conditionnement sous double sachet médical), ainsi que le modèle 3D du genou du patient,
- Réalisation de l'intervention chirurgicale.

Les examens **Only you**® peuvent être stockés sur CD ou DVD. Une étiquette doit y être appliquée, comprenant le nom du chirurgien, l'identification du patient, le côté de la chirurgie, la date d'acquisition et la date de l'intervention.

Les supports de stockage peuvent être postés à l'adresse suivante :

GROUPE  
**FH ORTHO**™



3 rue de la Forêt  
BP 50009  
68990 HEIMSBRUNN CEDEX

En cas de problème, veuillez nous contacter au : 03 89 81 90 92


## PLANNING OPÉRAIRE INTERACTIF 3D CONÇU PAR VOUS

Tous les dossiers des patients sont regroupés dans un espace personnel et sécurisé accessible par internet, uniquement par le chirurgien, à tout moment et partout.

Pour chaque cas, le chirurgien retrouve toutes les mesures pré-opératoires de son patient et peut modifier tous les paramètres de la chirurgie :

**Sur le fémur :** niveaux de coupes distales et postérieures, rotation fémorale externe, valgus fémoral...

**Sur le tibia :** niveau de résection, pente tibiale, rotation des implants, varus/valgus.

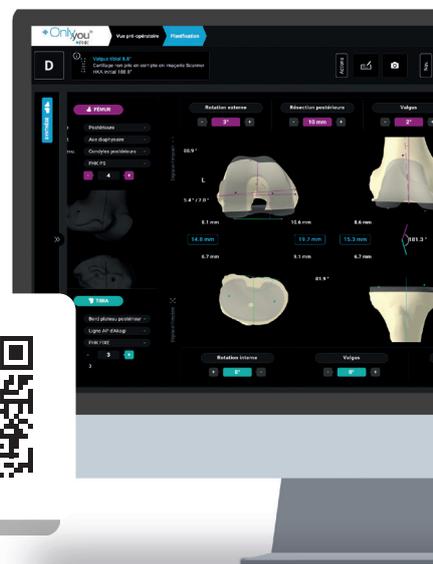


Le chirurgien peut personnaliser son espace de planification en paramétrant ses préférences chirurgicales et son interface graphique.

## RÉFÉRENCES

Réf.	Désignation
K-TKA-01-FHO	Kit Only You® FHK scanner avec fantôme
K-TKA-07-FHO	Kit Only You® FHK IRM avec fantôme
K-TKA-PLANIFICATION-FHO	Planification 3D Knee FHO

Pour tout guide de coupes personnalisé, une planification est obligatoire.

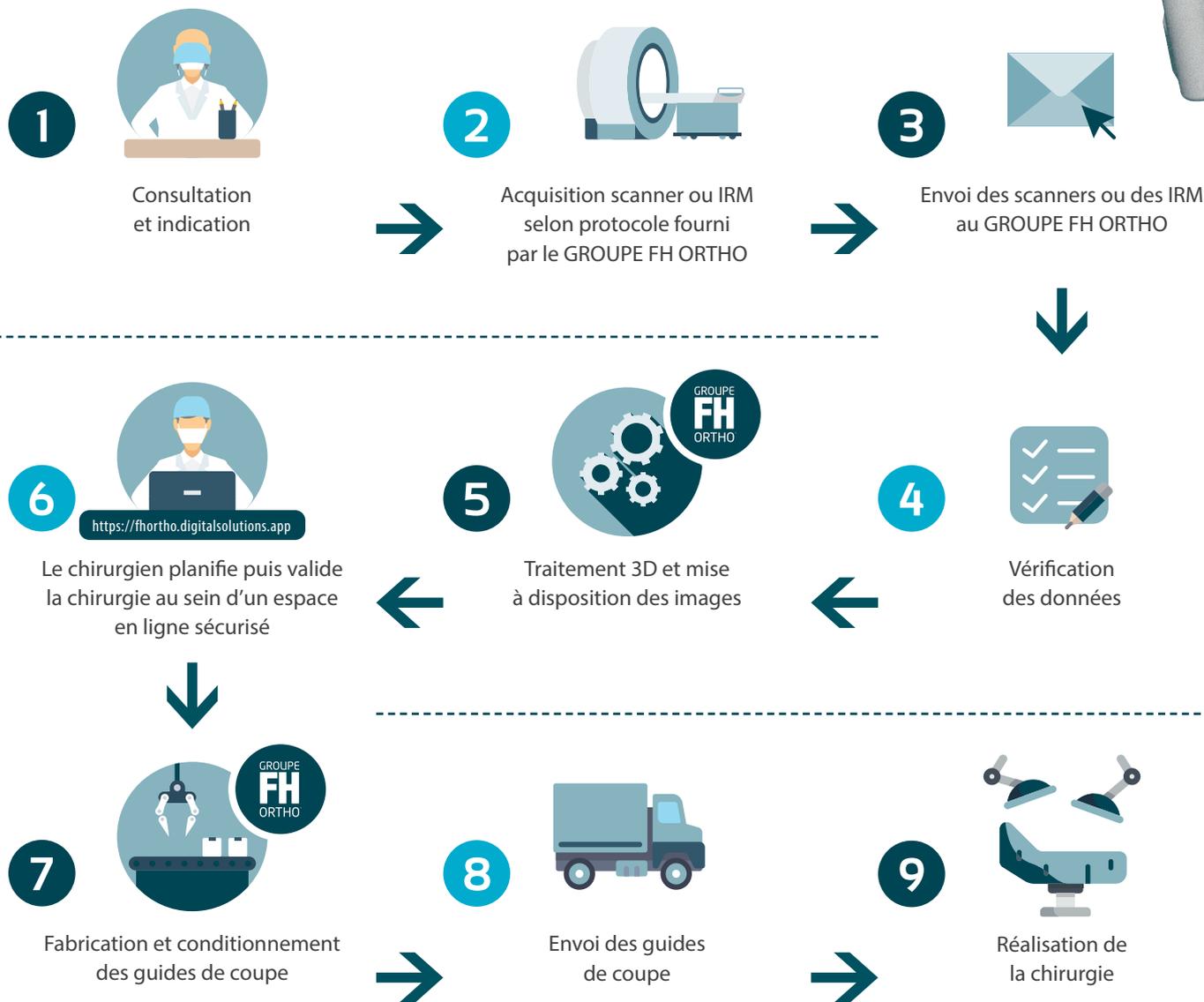

**4 semaines sont nécessaires** entre l'acquisition des images et l'intervention chirurgicale, si la validation des données est faite sans délai.

À chaque étape, **un email est envoyé au chirurgien** pour le tenir informé de l'avancement de la fabrication des guides de coupes.



DISTRIBUTEURS  
 DISTRIBUTORS

GROUPE  
**FH ORTHO**<sup>™</sup>

**FR, FH ORTHO SAS**  
 3 rue de la Forêt - Zone Industrielle  
 BP 50009  
 68990 Heimsbrunn CEDEX - FRANCE  
 Tél. +33 (0)3 89 81 90 92  
 Fax : +33 (0)3 89 81 80 11  
 info@fhortho.com  
 www.fhortho.com

**USA, FH ORTHOPEDICS INC.**  
 OrthoEx  
 7327 E Tierra Buena Lane  
 Scottsdale, Arizona 85260 - USA  
 Phone: +1 (412) 965-0950  
 customerservice@fhortho-us.com  
 www.fhortho.com

**PL, FH ORTHO POLSKA**  
 Ul. Garbary 95/A6,  
 61-757 Poznan - POLSKA  
 Phone: +48 61 863 81 27  
 Fax: +48 61 863 81 28  
 biuro@implants24.pl  
 www.fhortho.com