


Protocole de réalisation de guides de coupe sur mesure

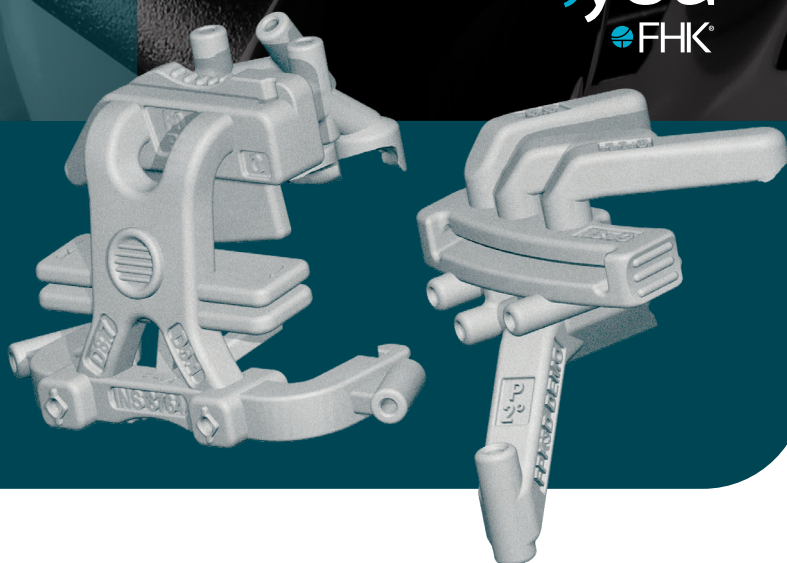

Les guides de coupe **Only you®** pour la prothèse totale de genou **FHK®** font partie d'une approche personnalisée et d'une planification 3D de la chirurgie de chaque patient, basée sur scanner ou IRM.



DÉTAIL DE LA PROCÉDURE

Prescription d'un scanner ou d'une IRM du genou.

Réalisation de la procédure radiologique selon protocole spécifique.

- Délai 4 semaines -

- Envoi des images au GROUPE FH ORTHO,
- Traitement des données et mise en ligne des images de chaque patient sur le site de planification Only you® : <https://fhortho.digitalsolutions.app>
- Planification réalisée par le chirurgien,
- Livraison des guides de coupe à l'établissement, propres et prêts à être stérilisés (conditionnement sous double sachet médical), ainsi que le modèle 3D du genou du patient,
- Réalisation de l'intervention chirurgicale.

Les examens Only you® peuvent être stockés sur CD ou DVD.

Une étiquette doit y être appliquée, comprenant le nom du chirurgien, l'identification du patient, le côté de la chirurgie, la date d'acquisition et la date de l'intervention.

Les supports de stockage peuvent être postés à l'adresse suivante :



GROUPE
FH ORTHO™

3 rue de la Forêt
BP 50009
68990 HEIMSBRUNN CEDEX

En cas de problème, veuillez nous contacter au : 03 89 81 90 92

PLANNING OPÉRATOIRE INTERACTIF 3D CONÇU PAR VOUS

Tous les dossiers des patients sont regroupés dans un espace personnel et sécurisé accessible par internet, uniquement par le chirurgien, à tout moment et partout.

Pour chaque cas, le chirurgien retrouve toutes les mesures pré-opératoires de son patient et peut modifier tous les paramètres de la chirurgie :


Sur le fémur : niveaux de coupes distales et postérieures, rotation fémorale externe, valgus fémoral...

Sur le tibia : niveau de résection, pente tibiale, rotation des implants, varus/valgus.




Le chirurgien peut personnaliser son espace de planification en paramétrant ses préférences chirurgicales et son interface graphique.

Les étapes du process

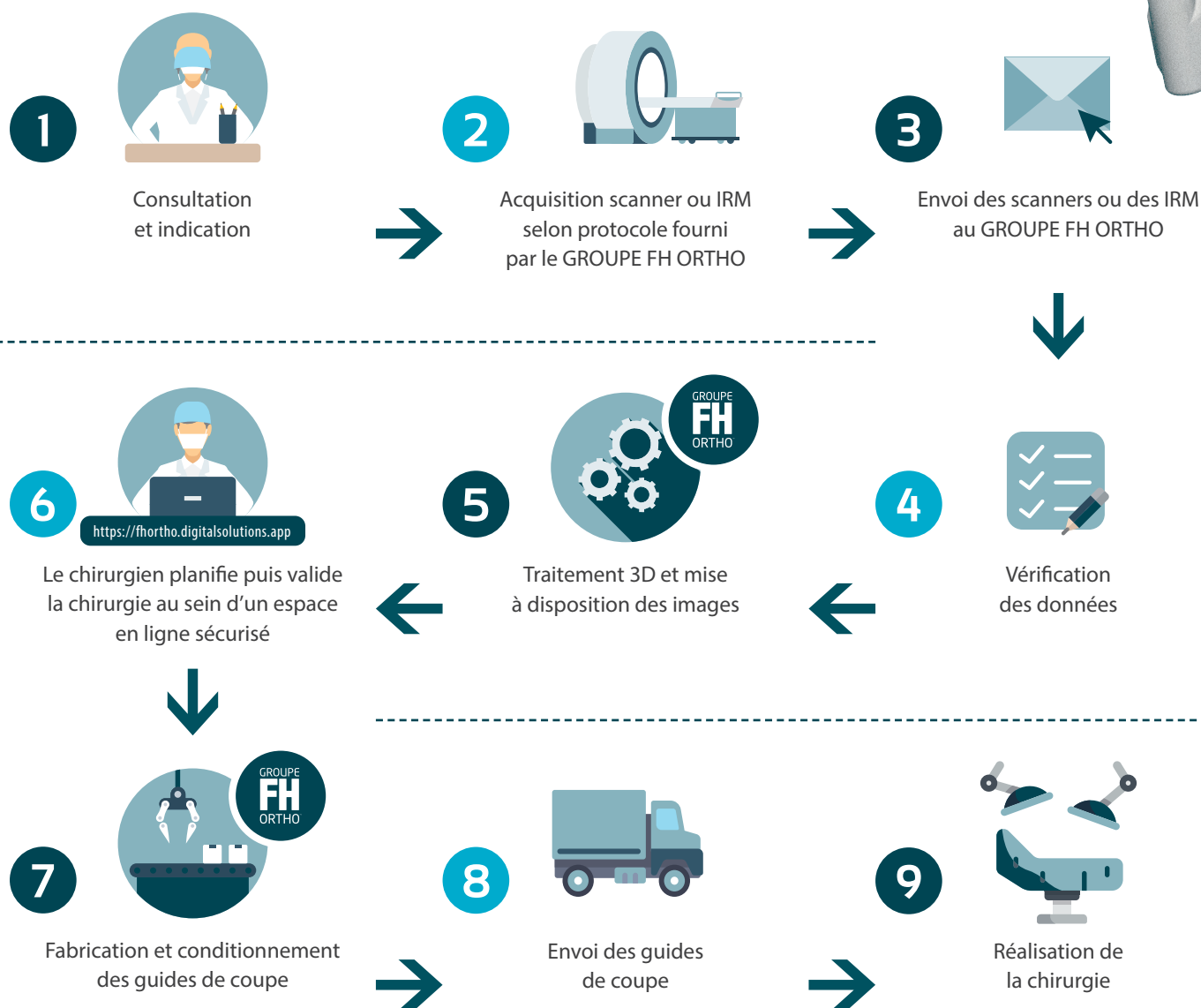

4 semaines sont nécessaires entre l'acquisition des images et l'intervention chirurgicale, si la validation des données est faite sans délai.

À chaque étape, **un email est envoyé au chirurgien** pour le tenir informé de l'avancement de la fabrication des guides de coupes.

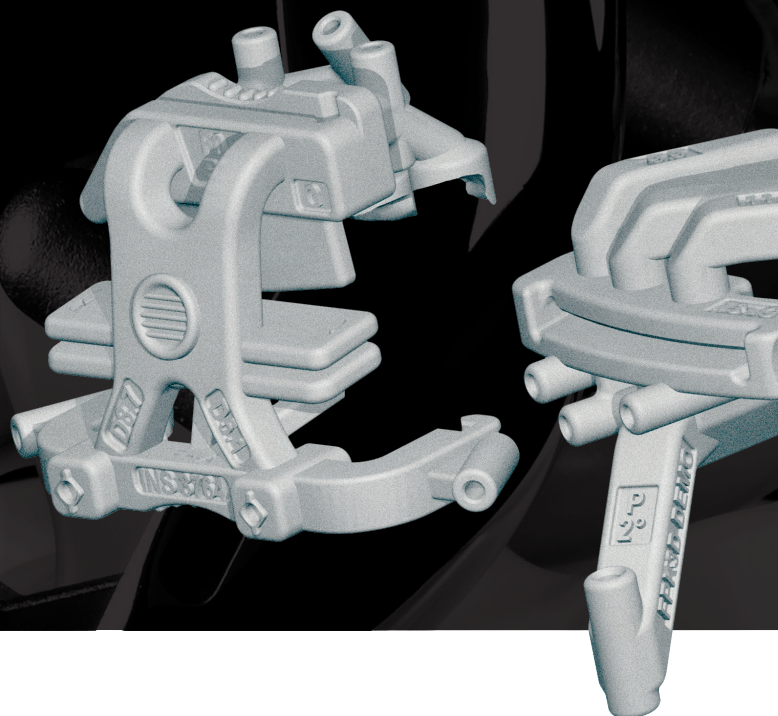

Réf.	Désignation
K-TKA-01-FHO	Knee TKA Kit 1 CT FHO
K-TKA-02-FHO	Knee TKA Kit 2 CT FHO
K-TKA-03-FHO	Knee TKA Kit 3 CT FHO
K-TKA-04-FHO	Knee TKA Kit 4 CT FHO
K-TKA-05-FHO	Knee TKA Kit 5 CT FHO
K-TKA-06-FHO	Knee TKA Kit 6 CT FHO
K-TKA-07-FHO	Knee TKA Kit 7 IRM FHO
K-TKA-08-FHO	Knee TKA Kit 8 IRM FHO
K-TKA-09-FHO	Knee TKA Kit 9 IRM FHO
K-TKA-10-FHO	Knee TKA Kit 10 IRM FHO
K-TKA-11-FHO	Knee TKA Kit 11 IRM FHO
K-TKA-12-FHO	Knee TKA Kit 12 IRM FHO
K-TKA-13-FHO	Knee TKA Kit 13 CT FHO Design2
K-TKA-14-FHO	Knee TKA Kit 14 CT FHO Design2
K-TKA-15-FHO	Knee TKA Kit 15 CT FHO Design2
K-TKA-16-FHO	Knee TKA Kit 16 CT FHO Design2
K-TKA-17-FHO	Knee TKA Kit 17 CT FHO Design2

Réf.	Désignation
K-TKA-18-FHO	Knee TKA Kit 18 CT FHO Design2
K-TKA-19-FHO	Knee TKA Kit 19 IRM FHO Design2
K-TKA-20-FHO	Knee TKA Kit 20 IRM FHO Design2
K-TKA-21-FHO	Knee TKA Kit 21 IRM FHO Design2
K-TKA-22-FHO	Knee TKA Kit 22 IRM FHO Design2
K-TKA-23-FHO	Knee TKA Kit 23 IRM FHO Design2
K-TKA-24-FHO	Knee TKA Kit 24 IRM FHO Design2
K-TKA-25-FHO	Knee TKA Kit 25 CT FHO Design3
K-TKA-26-FHO	Knee TKA Kit 26 CT FHO Design3
K-TKA-27-FHO	Knee TKA Kit 27 CT FHO Design3
K-TKA-28-FHO	Knee TKA Kit 28 CT FHO Design3
K-TKA-29-FHO	Knee TKA Kit 29 IRM FHO Design3
K-TKA-30-FHO	Knee TKA Kit 30 IRM FHO Design3
K-TKA-31-FHO	Knee TKA Kit 31 IRM FHO Design3
K-TKA-32-FHO	Knee TKA Kit 32 IRM FHO Design3
K-TKA-PLANIFICATION-FHO	Planification 3D Knee FHO

Pour tout guide de coupes personnalisé, une planification est obligatoire.



DISTRIBUTEURS
DISTRIBUTORS

GRUPE
FH ORTHO™

FR, FH ORTHO SAS
3 rue de la Forêt - Zone Industrielle
BP 50009
68990 Heimsbrunn CEDEX - FRANCE
Tél. +33 (0)3 89 81 90 92
Fax : +33 (0)3 89 81 80 11
info@fhortho.com
www.fhortho.com

USA, FH ORTHOPEDICS INC.
OrthoEx
7327 E Tierra Buena Lane
Scottsdale, Arizona 85260 - USA
Phone: +1 (412) 965-0950
customerservice@fhortho-us.com
www.fhortho.com

PL, FH ORTHO POLSKA
Ul. Garbary 95/A6,
61-757 Poznan - POLSKA
Phone: +48 61 863 81 27
Fax: +48 61 863 81 28
biuro@implants24.pl
www.fhortho.com