




HANCHE



INOX



COBALT CHROME

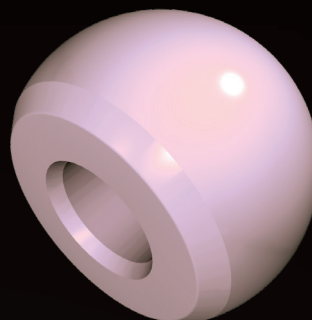

BIOLOX® DELTA

FICHE TECHNIQUE

GAMME DE TÊTES 12/14



HANCHE

GROUPE
FH ORTHO™

Le Groupe FH ORTHO propose avec ses tiges fémorales une large gamme de têtes issues de différents matériaux, mais uniquement en cône 12/14.

Nous rappelons que les inserts céramiques de FH ORTHO ne peuvent être implantés qu'avec des têtes BIOLOX® FORTE ou BIOLOX® DELTA.



Les inserts en polyéthylène hautement réticulé TRIANON ne peuvent être implantés qu'avec des têtes en CoCr ou en céramique BIOLOX®, mais en aucun cas avec des têtes en INOX.

Ablation de la tête

Retirer la tête fémorale prothétique de la tige en appliquant un choc sur la tête à la jonction tête/cône dans l'axe du col fémoral en direction de l'extrémité proximale de la tête à l'aide de l'impacteur de tige réf. 257 220 ou d'un chasse-greffons et d'un marteau (instrumentation standard du bloc opératoire).


Pour pouvoir laisser la tige fémorale en place (remplacement de la tête fémorale prothétique uniquement), **il faut veiller à ne pas endommager le cône de la tige.**

La tête fémorale doit être détruite de manière appropriée.

RÉFÉRENCES



INOX	
231402	TÊTE INOX CONE 12/14 D.22,2 M (0)
231403	TÊTE INOX CONE 12/14 D.22,2 L (+2)
247852	TÊTE INOX CONE 12/14 D.28 XS (-5)
231391	TÊTE INOX CONE 12/14 D.28 S (-3,5)
231392	TÊTE INOX CONE 12/14 D.28 M (0)
231393	TÊTE INOX CONE 12/14 D.28 L (+3,5)
231394	TÊTE INOX CONE 12/14 D.28 XL (+7)

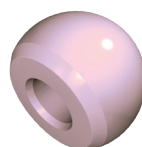

ALUMINE BIOLOX® DELTA	
256516	TÊTE BIOLOX® DELTA CONE 12/14 D.28 S
256517	TÊTE BIOLOX® DELTA CONE 12/14 D.28 M
256518	TÊTE BIOLOX® DELTA CONE 12/14 D.28 L
256519	TÊTE BIOLOX® DELTA CONE 12/14 D.32 S
256520	TÊTE BIOLOX® DELTA CONE 12/14 D.32 M
256521	TÊTE BIOLOX® DELTA CONE 12/14 D.32 L
266371	TÊTE BIOLOX® DELTA CONE 12/14 D.32 XL
256522	TÊTE BIOLOX® DELTA CONE 12/14 D.36 S
256523	TÊTE BIOLOX® DELTA CONE 12/14 D.36 M
256524	TÊTE BIOLOX® DELTA CONE 12/14 D.36 L
266372	TÊTE BIOLOX® DELTA CONE 12/14 D.36 XL



COBALT CHROME	
240862	TÊTE CRCO CONE 12/14 D.28 S (-3,5)
240863	TÊTE CRCO CONE 12/14 D.28 M (0)
240864	TÊTE CRCO CONE 12/14 D.28 L (+3,5)
240865	TÊTE CRCO CONE 12/14 D.28 XL (+7)
240870	TÊTE CRCO CONE 12/14 D.32 S (-3,5)
240871	TÊTE CRCO CONE 12/14 D.32 M (0)
240872	TÊTE CRCO CONE 12/14 D.32 L (+3,5)
240873	TÊTE CRCO CONE 12/14 D.32 XL (+7)



DISTRIBUTEURS
DISTRIBUTORS

FR, FH ORTHO SAS
3 rue de la Forêt - Zone Industrielle
BP 50009
68990 Heimsbrunn CEDEX - FRANCE
Tél. +33 (0)3 89 81 90 92
info@fhortho.com
www.fhortho.com

USA, FH ORTHOPEDICS INC.
OrthoEx
7327 E Tierra Buena Lane
Scottsdale, Arizona 85260 - USA
Phone: +1 (412) 965-0950
customerservice@fhortho-us.com
www.fhortho.com

PL, FH ORTHO POLSKA
Ul. Garbary 95/A6,
61-757 Poznan - POLSKA
Phone: +48 61 863 81 27
Fax: +48 61 863 81 28
biuro@implants24.pl
www.fhortho.com



FABRICANT
MANUFACTURER

FR, FH INDUSTRIE
6 rue Nobel, Z.I. de Kernevez
29000 QUIMPER - FRANCE
Tél. +33 (0)2 98 55 68 95
contact-fhi@fhortho.com
www.fhortho.com